


Guida di riferimento rapido

App Masimo SafetyNet™

AVVERTENZA: non effettuare un'auto-diagnosi o un'auto-medicazione sulle basi di queste misurazioni. Consultare sempre il medico.

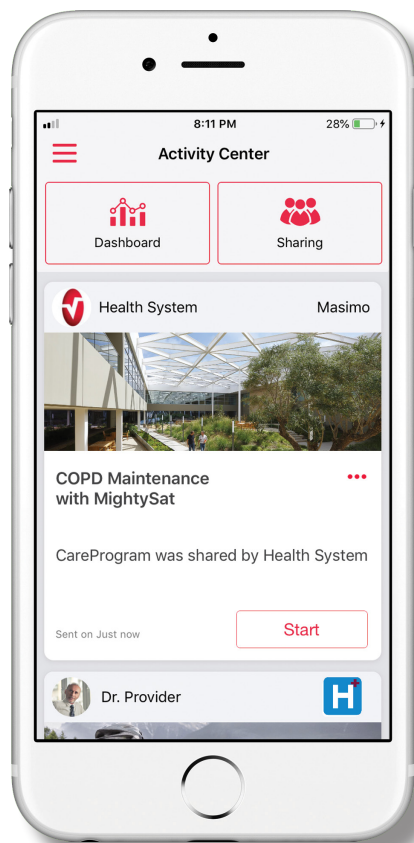

> Scaricare e installare l'app Masimo SafetyNet da:

App Store



Google Play



> Avviare l'app e seguire le istruzioni dettagliate per creare un account, partecipare a un programma CareProgram™ condiviso, iniziare a raccogliere e condividere dati.

Per assistenza o altre domande, visitare:
www.masimo.com/masimo-safetynet



L'app non è destinata all'utilizzo come strumento di prevenzione, diagnosi o trattamento di patologie. L'uso del marchio PATIENT SAFETYNET è sotto licenza di University HealthSystem Consortium. Tutti gli altri marchi e i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

©2020 Masimo Corporation
301368/LAB-10722A-0420
EN-LAB-10206B

www.masimo.com


Accesso, registrazione, notifiche

> Verificare che le notifiche siano consentite per un corretto funzionamento dell'app.

> Sign Up (Registrati)

- Gli utenti che hanno ricevuto un CareProgram da un operatore sanitario devono effettuare la registrazione con l'indirizzo e-mail o il numero di telefono utilizzato per l'invio dell'invito.
- Registrare un account usando come nome utente l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il servizio Single Sign-On di Google.

iOS

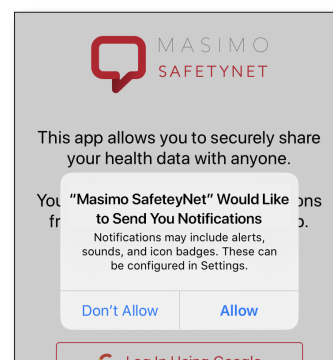

CONSENTIRE LE NOTIFICHE

www.masimo.com



This app allows you to securely share your health data with anyone.

You can also receive care instructions from your doctor through this app.


 Log In Using Google

Or Log In Using Doctella ID

Sign Up


Log In

Android

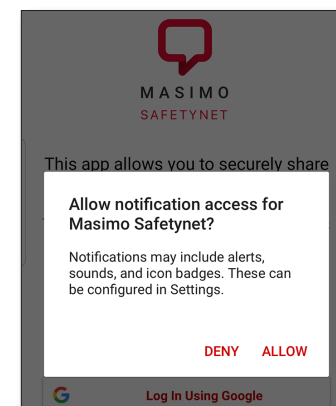


Autorizzazioni per i dati sulla salute

iOS

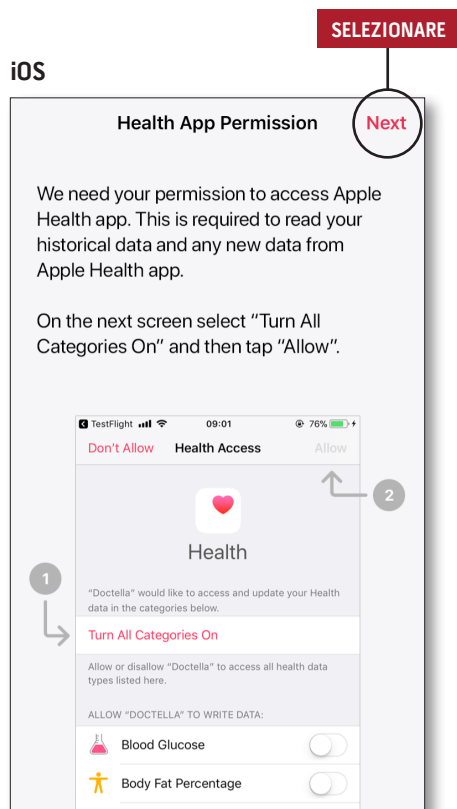

> **Seguire le istruzioni visualizzate:**
per consentire a Masimo SafetyNet
di accedere ai dati sulla salute e
raccolgerli dal dispositivo.

Android

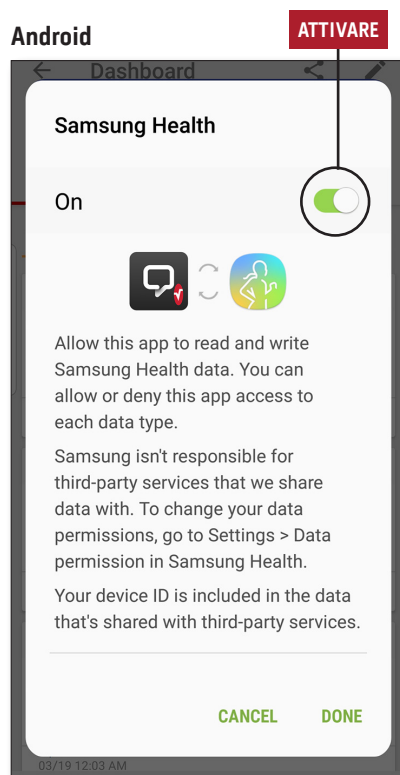

Centro attività

> **Menu**

- Visualizza il menu dell'app.

> **Dashboard (Dashboard)**


- Visualizza la schermata Dashboard (Dashboard) che contiene i dati sulla salute dell'utente.
- Visualizza i dati sulla salute condivisi da altri utenti.

> **Sharing (Condivisione)**


- Visualizza l'operatore sanitario, il personale dell'assistenza e i componenti della famiglia con cui l'utente al momento sta condividendo i dati.
- Condivide i dati con un altro operatore sanitario, altro personale dell'assistenza o un altro componente della famiglia.

> **CareProgram**

- Consente all'utente di visualizzare o eliminare un CareProgram.

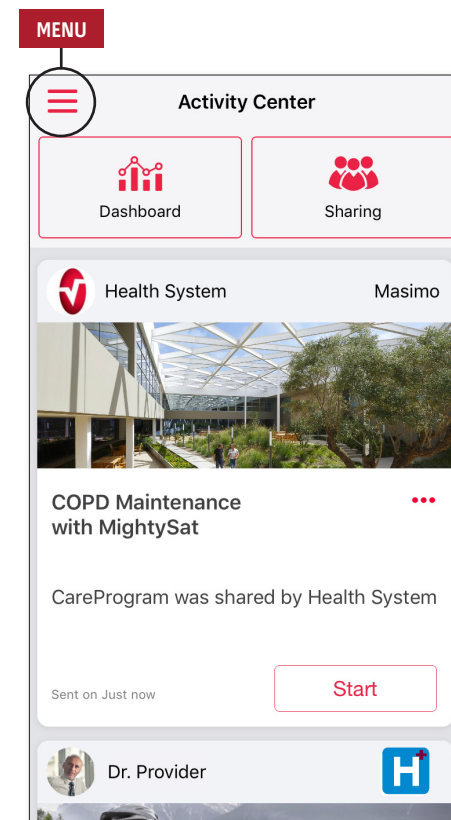

Menu

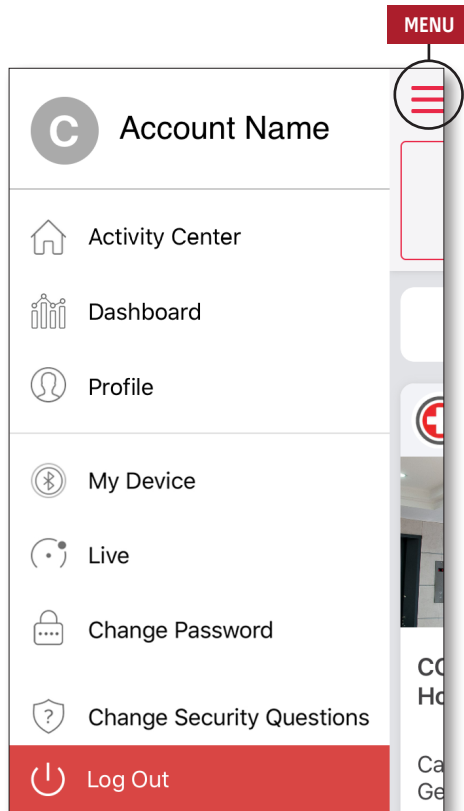

> Feedback (Feedback)

- Consente all'utente di inviare un'e-mail al supporto di Masimo SafetyNet.

> Rate on App Store (Valuta nello store di app)

- Consente all'utente di assegnare una valutazione all'app nello store di app.

> Activity Center (Centro attività)

- Visualizza la schermata Activity Center (Centro attività).

> Dashboard (Dashboard)

- Visualizza la schermata Dashboard (Dashboard).

> Profile (Profilo)

- Visualizza le informazioni del profilo utente.
- Consente all'utente di modificare le informazioni del profilo.

> My Device (Dispositivo personale)

- Consente all'utente di aggiungere un dispositivo per il monitoraggio.

> Live (In tempo reale)

- Consente all'utente di visualizzare i dati del dispositivo di monitoraggio connesso.

> Change Password (Modifica password)/Change Security Questions (Modifica domande di sicurezza)

- Consente all'utente di modificare la password e/o le domande di sicurezza in caso di perdita della password.


> Notification Settings (Impostazioni di notifica)

- Consente all'utente di modificare le impostazioni dell'app relative ai promemoria e alle notifiche.

> Settings (Impostazioni)

- Visualizza l'ID utente.
- Consente all'utente di abilitare o disabilitare Touch ID o Face ID per accedere all'app.
- Visualizza informazioni sull'app.

Dashboard

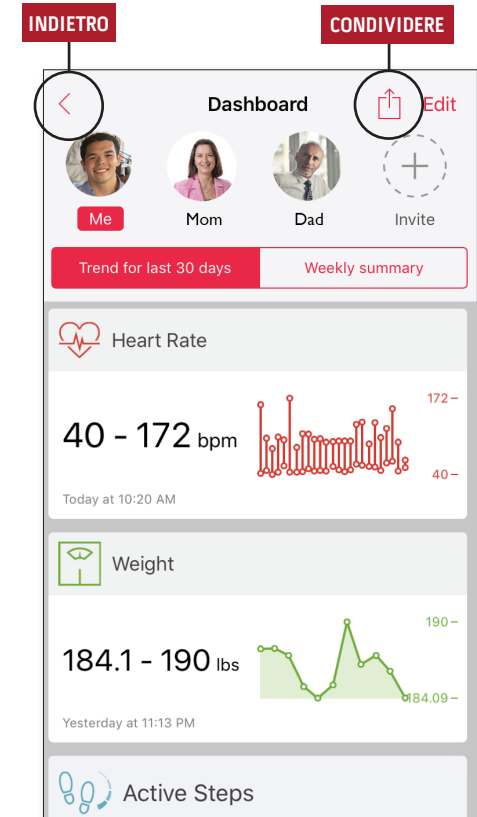

> Invite (Invita)

- Consente di invitare altri utenti alla condivisione di informazioni tramite l'app.

> Sharing (Condivisione)

- Visualizza l'operatore sanitario, il personale dell'assistenza e i componenti della famiglia con cui l'utente al momento sta condividendo i dati.


> Edit (Modifica)

- Consente all'utente di riorganizzare i dati nella Dashboard (Dashboard).

> Visualizza i dati degli ultimi 30 giorni o un riepilogo settimanale.

> La selezione della scheda di un parametro consente di visualizzare le tendenze, gli intervalli di date e molte altre informazioni.

CareProgram

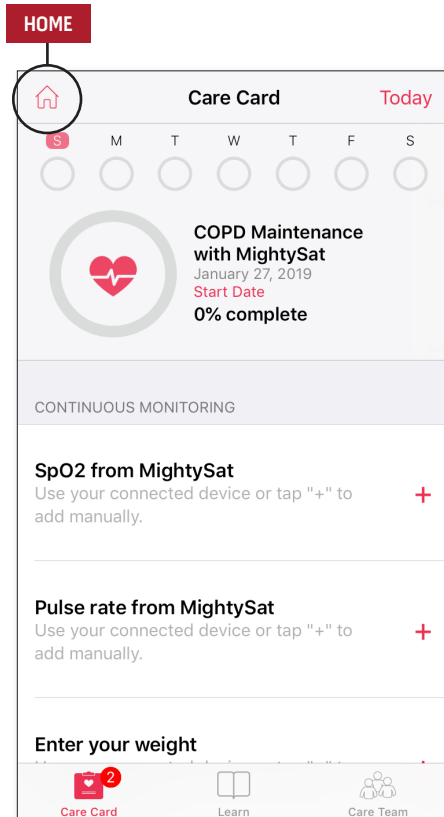

> Care Card (Scheda sanitaria)

- Visualizza i dati della Care Card (Scheda sanitaria).

> Home

- Torna all'Activity Center (Centro attività).


> Learn (Scopri)

- Visualizza altre informazioni fornite dal personale dell'assistenza.

> Care Team (Team sanitari)

- Visualizza l'elenco degli operatori sanitari, del personale dell'assistenza e dei componenti della famiglia con cui vengono condivisi di dati.

Condivisione

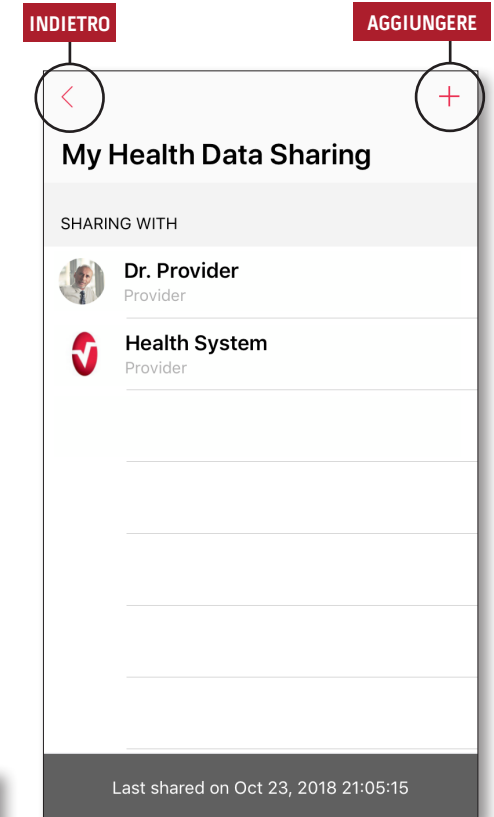

- > Visualizza l'elenco degli operatori sanitari, del personale dell'assistenza e dei componenti della famiglia con cui vengono condivisi di dati.

> Aggiungere

- Condividere i dati con altri operatori sanitari.
- Condividere i dati con altro personale dell'assistenza o altri componenti della famiglia.

- > Scorrere per modificare i privilegi.

AGGIUNGERE

